


# Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System  
passend zu **Amistem** (Medacta)

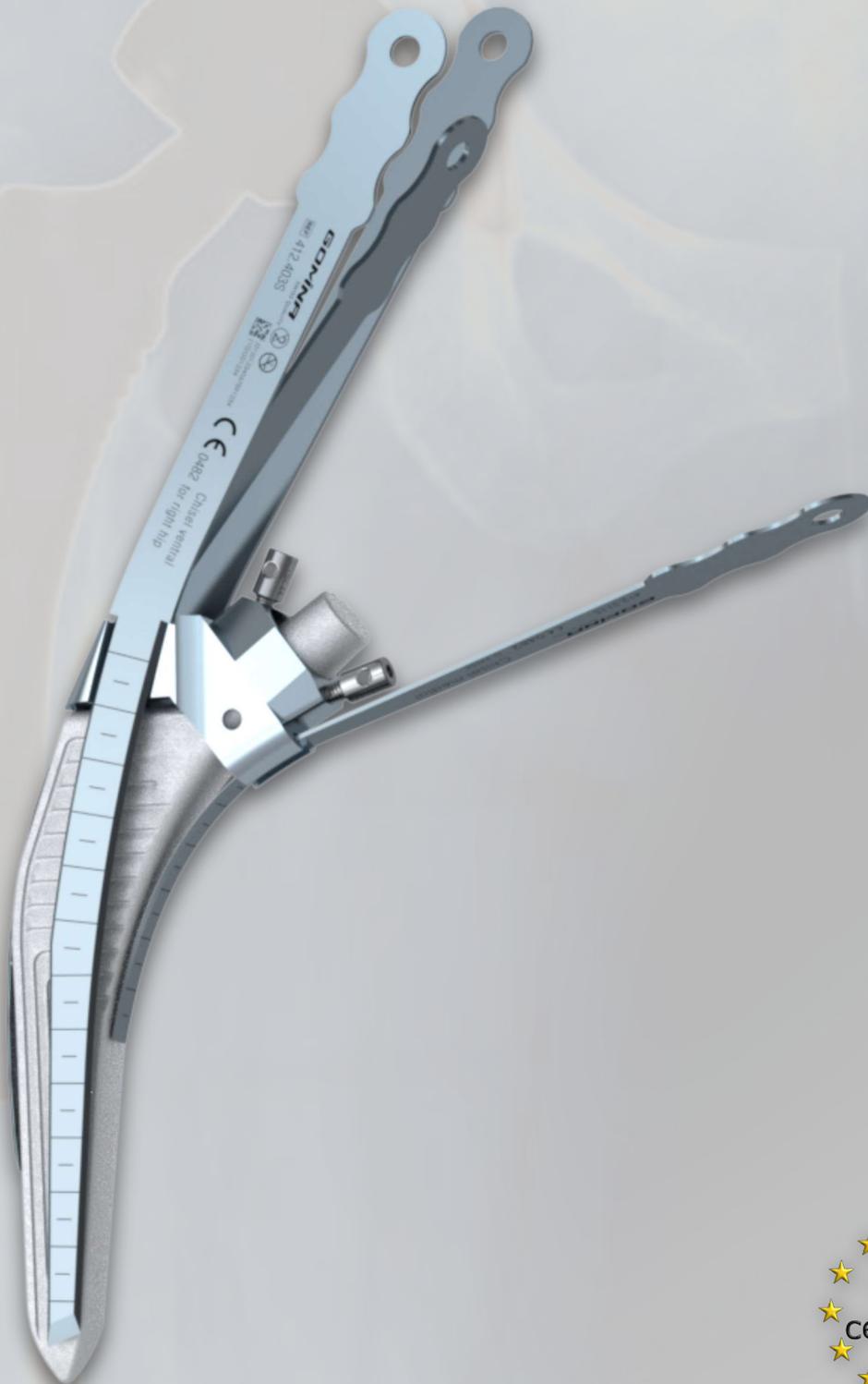

# Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



## Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

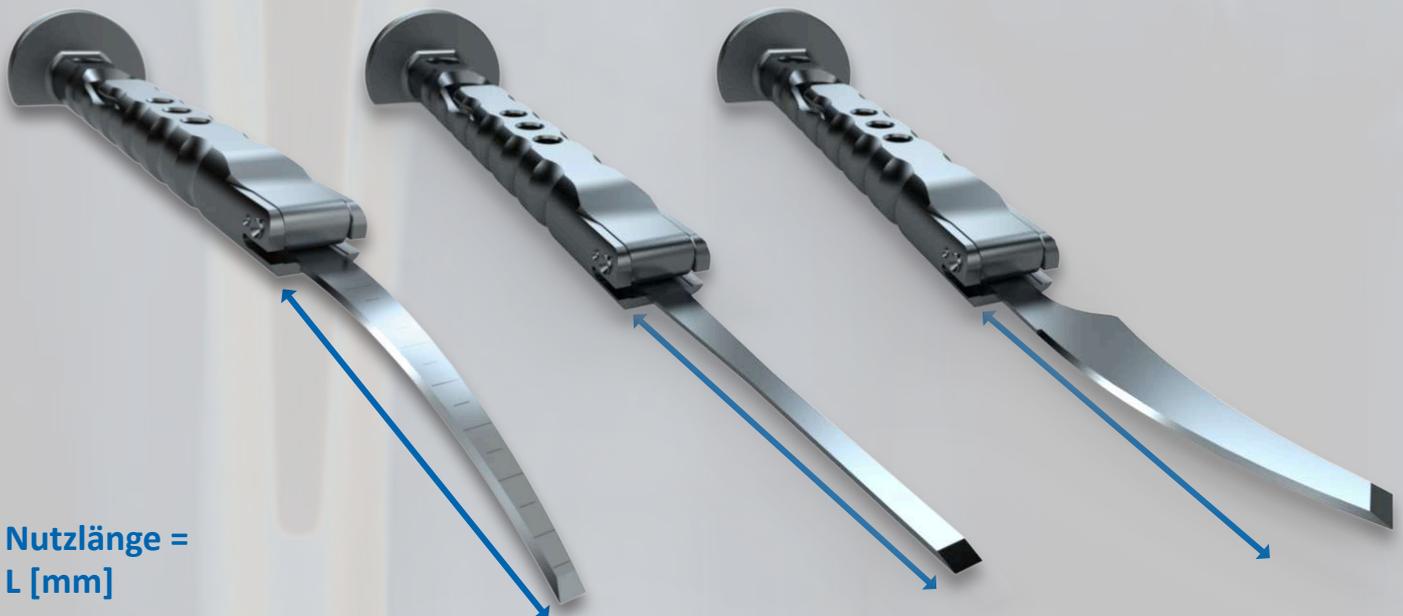

Nutzlänge =  
L [mm]

# Schablone

Führungsrillen

Führungsrillen




Die schablonengeführten Meißel sind auf die Führungsrillen der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meißel werden durch die Führungsrillen geführt bis die Meißelklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meißel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.

Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit den beiden Fixierschrauben befestigt.



Bei standard Schäften muss zuerst die *mediale* Fixierschraube komplett eingeschraubt werden. Danach die *laterale* Schraube einschrauben bis sie durch Kontakt mit dem Schaft die Schablone fixiert. (Bild 1)


Bei lateralisierten Schäften zuerst die *laterale* Fixierschraube komplett einschrauben. Dann die *mediale* Schraube einschrauben bis sie die Schablone fixiert. (Bild 2)

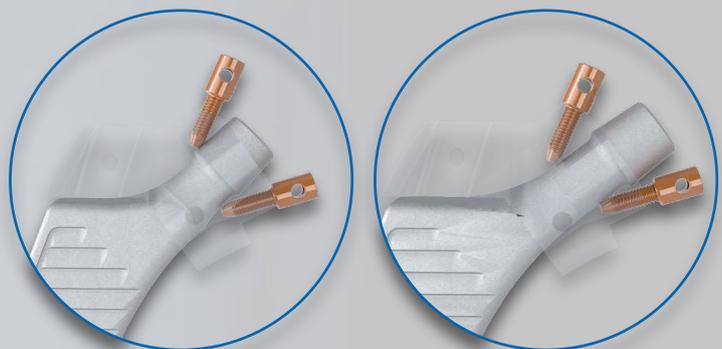

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Übersicht Meissel mit Schablone

*\*Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.*

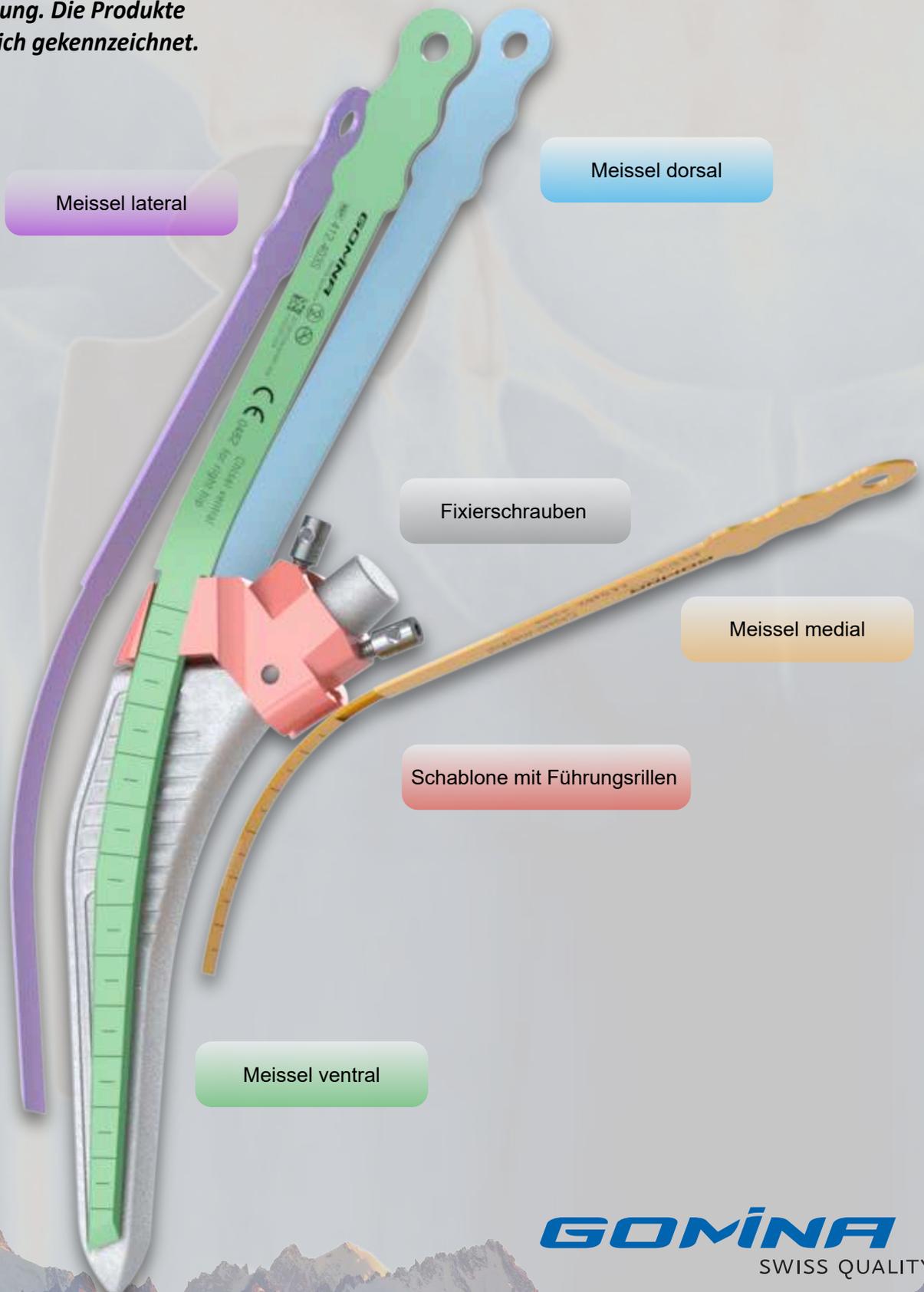

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 0, 1



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

<b>413.201S</b>	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

<b>413.211S</b>	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

<b>412.401S</b>	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

<b>412.402S</b>	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



<b>413.901</b>	Schablone
----------------	-----------



<b>400.101</b>	Fixierschraube
----------------	----------------



<b>400.106</b>	Inbusschlüssel
----------------	----------------

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 2, 3



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

<b>413.202S</b>	Meissel lateral	137.5	7.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

<b>413.211S</b>	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

<b>412.403S</b>	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

<b>412.404S</b>	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



<b>413.902</b>	Schablone
----------------	-----------



<b>400.101</b>	Fixierschraube
----------------	----------------



<b>400.106</b>	Inbusschlüssel
----------------	----------------

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 4, 5



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

<b>413.203S</b>	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

<b>413.211S</b>	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

<b>412.403S</b>	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

<b>412.404S</b>	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



<b>413.903</b>	Schablone
----------------	-----------



<b>400.101</b>	Fixierschraube
----------------	----------------



<b>400.106</b>	Inbusschlüssel
----------------	----------------

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 6, 7



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

<b>413.203S</b>	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

<b>413.211S</b>	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

<b>412.409S</b>	Meissel ventral für rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

<b>412.410S</b>	Meissel dorsal für rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



<b>413.904</b>	Schablone
----------------	-----------



<b>400.101</b>	Fixierschraube
----------------	----------------



<b>400.106</b>	Inbusschlüssel
----------------	----------------

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 8, 9



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

<b>413.203S</b>	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

<b>413.211S</b>	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

<b>412.409S</b>	Meissel ventral für rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

<b>412.410S</b>	Meissel dorsal für rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



<b>413.905</b>	Schablone
----------------	-----------



<b>400.101</b>	Fixierschraube
----------------	----------------



<b>400.106</b>	Inbusschlüssel
----------------	----------------

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Gesamtübersicht Artikelnummern

	Amistem Schaftgrößen	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
	Alle Grössen	400.001	Handgriff inkl. Ausschlagbolzen			
	Alle Grössen	400.100	Ausschlagbolzen (Ersatzteil)			
	0/1	413.201S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
	2/3	413.202S	Meissel lateral	137.5	7.8	1.19
	4/5/6/7/8/9	413.203S	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
	Alle Grössen	413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
	0/1	412.401S	Meissel ventral rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
	0/1	412.402S	Meissel dorsal rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
	2/3/4/5	412.403S	Meissel ventral rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
	2/3/4/5	412.404S	Meissel dorsal rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
	6/7/8/9	412.409S	Meissel ventral rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
	6/7/8/9	412.410S	Meissel dorsal rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
	0/1	413.901	Schablone			
	2/3	413.902	Schablone			
	4/5	413.903	Schablone			
	6/7	413.904	Schablone			
	8/9	413.905	Schablone			
	Alle Grössen	400.101	Fixierschraube			
	Alle Grössen	400.106	Inbusschlüssel			



# Kontakt



Gomina AG  
Raiftstrasse 4  
3989 Niederwald, Schweiz  
Tel. +41 27 970 12 70  
Fax +41 27 970 12 75  
[www.gomina.ch](http://www.gomina.ch)  
[sales@gomina.ch](mailto:sales@gomina.ch)

 0482

**EU REP**

GOMINA Deutschland GmbH  
Ludwig-Vierling-Strasse 7  
89233 Neu-Ulm, Deutschland  
[info@gomina.de](mailto:info@gomina.de)

Version 2025-09  
Zuletzt aktualisiert: 23.09.2025

**GOMINA**  
SWISS QUALITY