


Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System

passend zu **Fitmore®** (Zimmer Biomet)

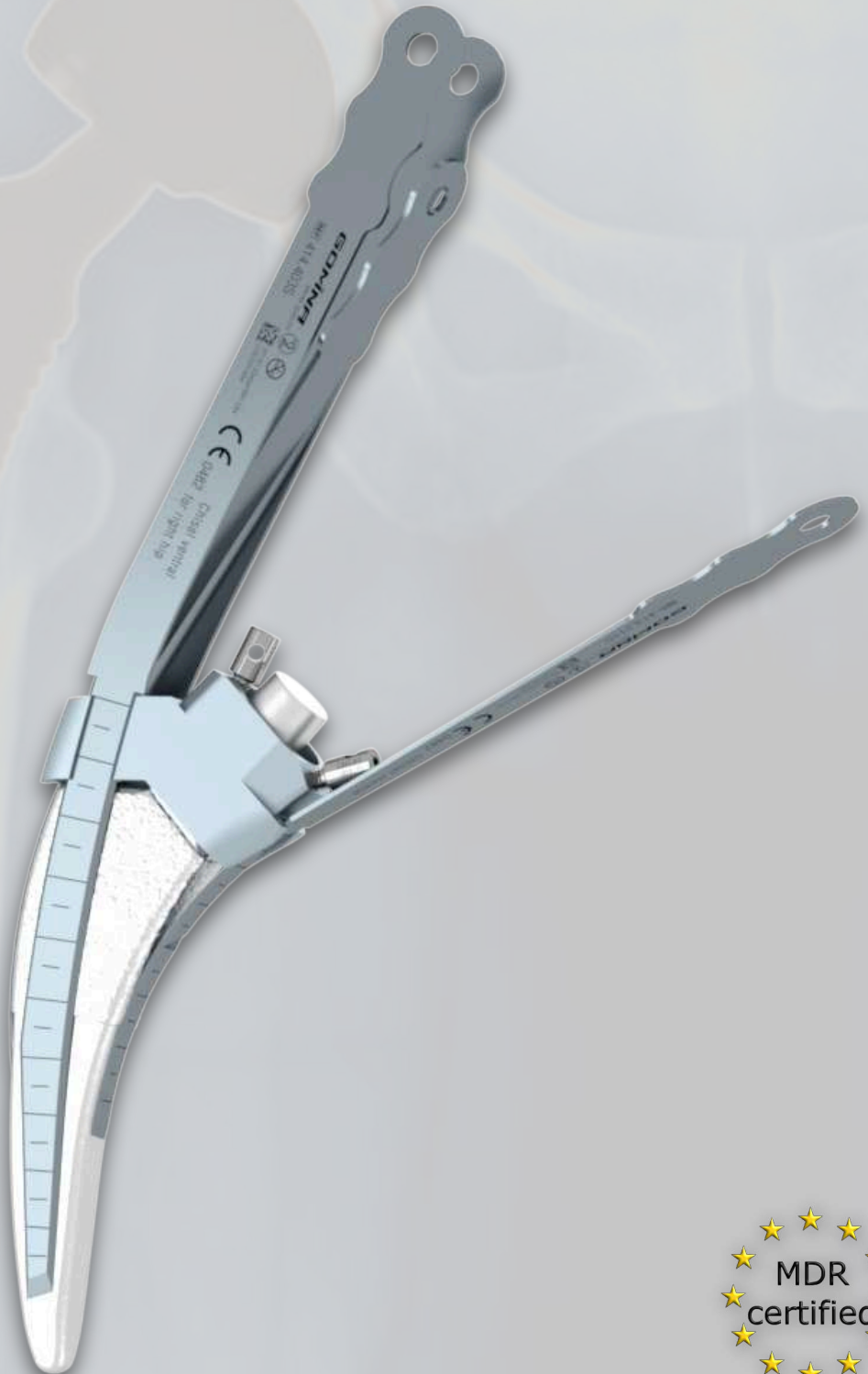

Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

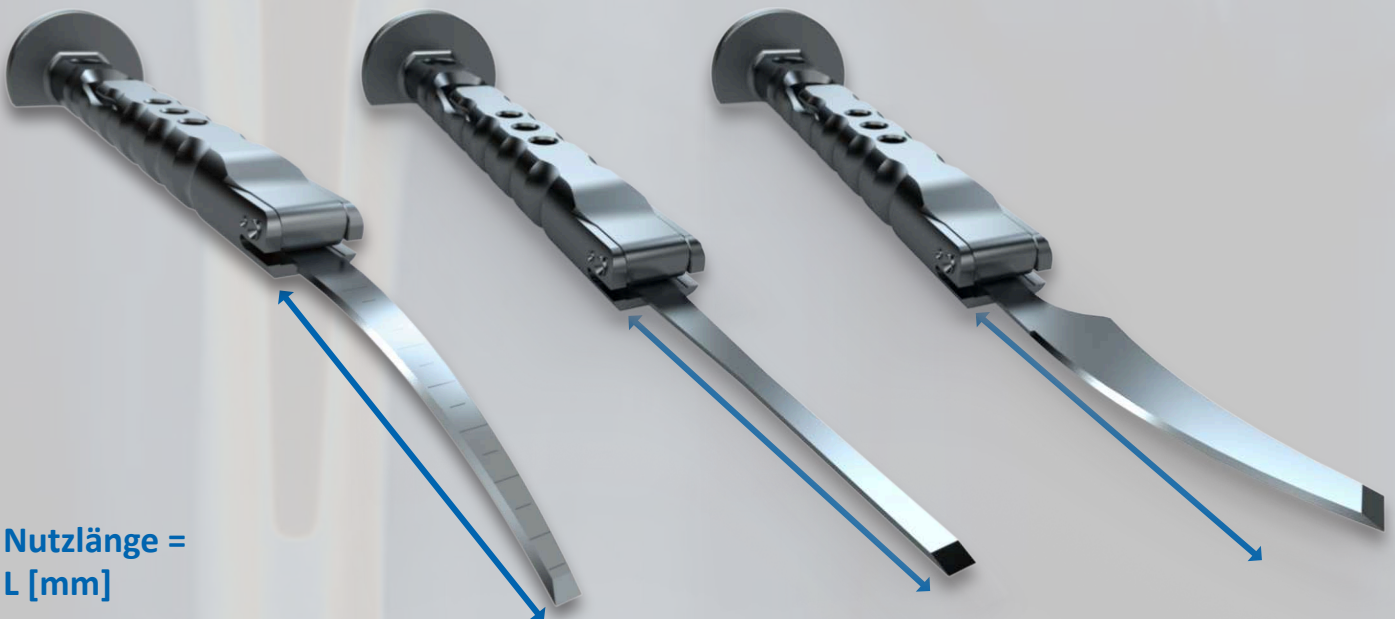


Nutzlänge =
L [mm]

Schablone

Führungsrillen

Führungsrillen

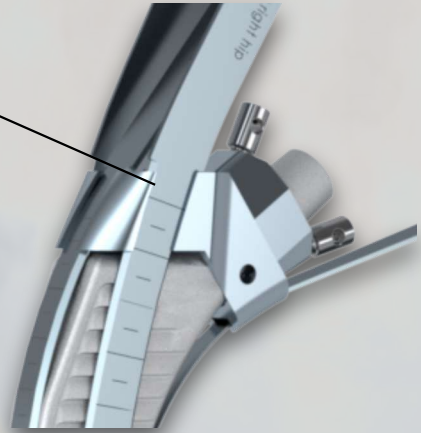


Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsrillen der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch die Führungsrillen geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.

Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit den beiden Fixierschrauben befestigt.



Bei A&B Schäften muss zuerst die *mediale* Fixierschraube komplett eingeschraubt werden. Danach die *laterale* Schraube einschrauben bis sie durch Kontakt mit dem Schaft die Schablone fixiert. (Bild 1)


Bei B extended Schäften zuerst die *laterale* Fixierschraube komplett einschrauben. Dann die *mediale* Schraube einschrauben bis sie die Schablone fixiert. (Bild 2)

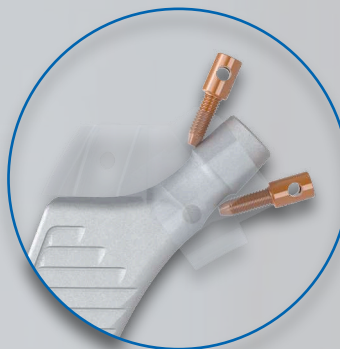

GOMINA
SWISS QUALITY


Übersicht Meissel mit Schablone

***Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.**

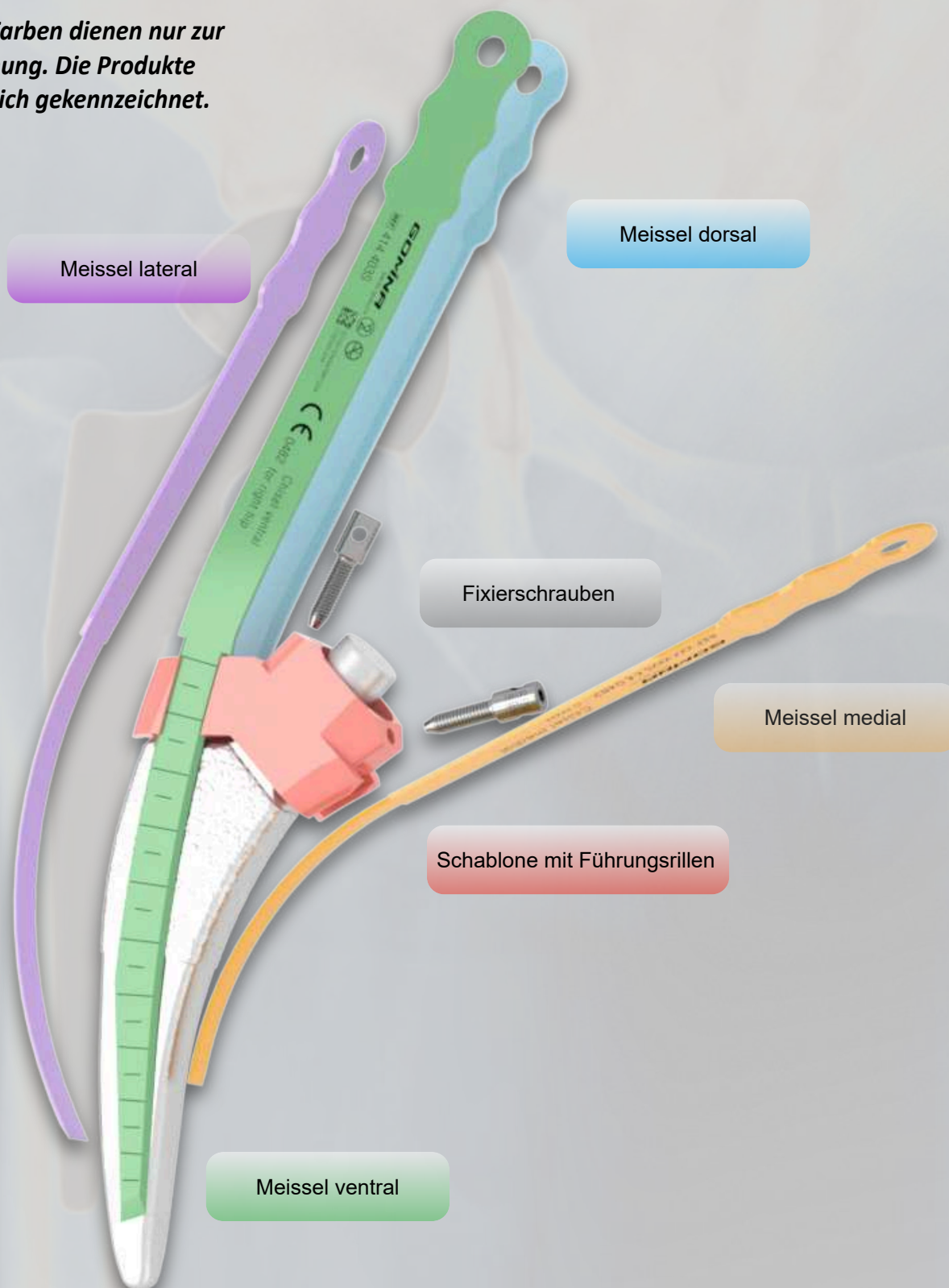


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Fitmore® Schaftgrössen **A1/A2/A3/B1/B2/B3 & extended**

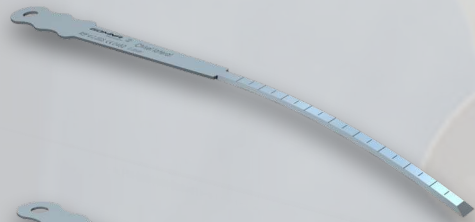

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


413.202S	Meissel lateral	138.0	7.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

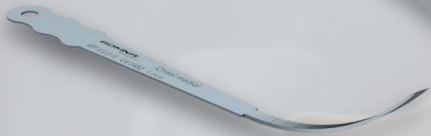

413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



414.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	148.7	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

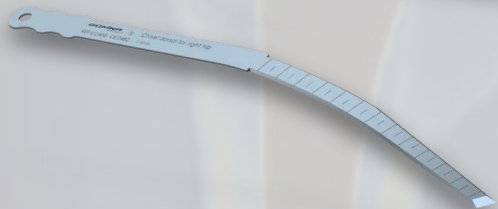

414.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	148.7	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



414.901	Schablone
----------------	-----------



400.108	Fixierschraube
----------------	----------------




400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

GOMINA
SWISS QUALITY


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Fitmore® Schaftgrössen **A4/A5/A6/B4/B5/B6 & extended**

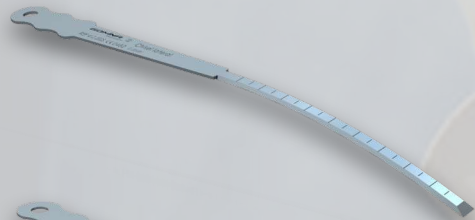

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


413.202S	Meissel lateral	138.0	7.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

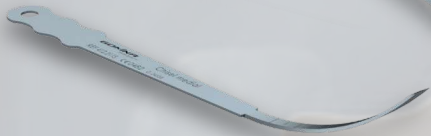

413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



414.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	157.6	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

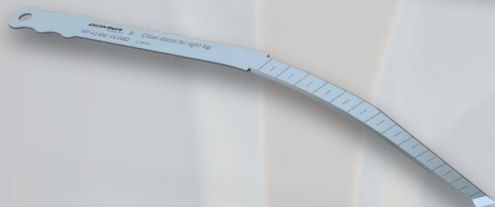

414.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	157.6	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



414.902	Schablone
----------------	-----------



400.108	Fixierschraube
----------------	----------------




400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

GOMINA
SWISS QUALITY


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Fitmore® Schaftgrössen **A7/A8/A9/B7/B8/B9 & extended**

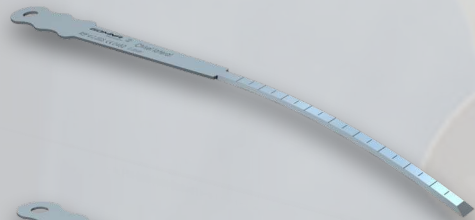


Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


413.202S	Meissel lateral	138.0	7.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

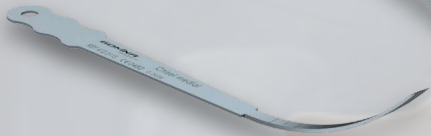

413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

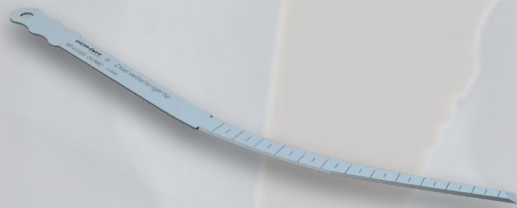

412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

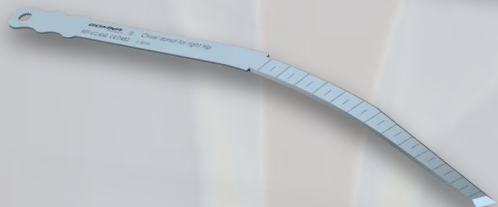

412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



414.903	Schablone
----------------	-----------



400.108	Fixierschraube
----------------	----------------




400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Fitmore® Schaftgrössen **A10/A11/A12/B10/B11/B12 & extended**

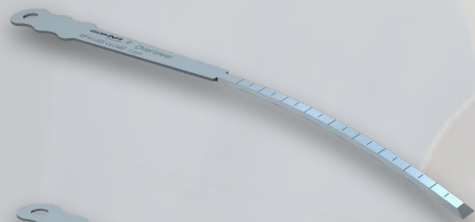


413.202S

Meissel lateral

138.0

7.8

1.19

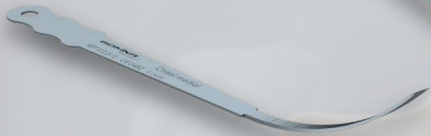

413.211S

Meissel medial

105.2

5.8

1.19




412.403S

Meissel ventral
für rechte Hüfte

170.0

7.1

1.19

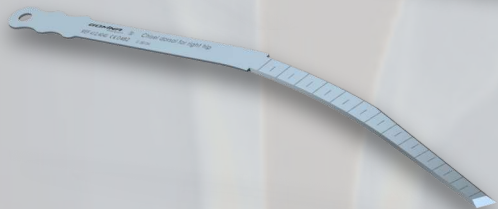

412.404S

Meissel dorsal
für rechte Hüfte

170.0

7.1

1.19



414.904

Schablone



400.108

Fixierschraube



400.106

Inbusschlüssel

GOMINA
SWISS QUALITY

Gesamtübersicht Artikelnummern



Fitmore Schaftgrössen	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
-----------------------	------------	--------------------	--------	--------	--------

Alle Grössen 400.001 Handgriff inkl. Ausschlagbolzen


Alle Grössen 400.100 Ausschlagbolzen (Ersatzteil)



Alle Grössen 413.202S Meissel lateral 138.0 7.8 1.19



Alle Grössen 413.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19

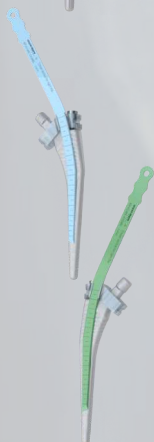

A1/A2/A3/B1/B2/B3 & ext. 414.401S Meissel ventral rechte Hüfte 148.7 4.0 1.19

A1/A2/A3/B1/B2/B3 & ext. 414.402S Meissel dorsal rechte Hüfte 148.7 4.0 1.19

A4/A5/A6/B4/B5/B6 & ext. 414.403S Meissel ventral rechte Hüfte 157.6 4.0 1.19


A4/A5/A6/B4/B5/B6 & ext. 414.404S Meissel dorsal rechte Hüfte 157.6 4.0 1.19

A7/A8/A9/B7/B8/B9 & ext. 412.401S Meissel ventral rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

A7/A8/A9/B7/B8/B9 & ext. 412.402S Meissel dorsal rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

A10/A11/A12/B10/B11/B12 & ext. 412.403S Meissel ventral rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19

A10/A11/A12/B10/B11/B12 & ext. 412.404S Meissel dorsal rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19

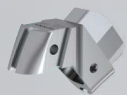

A1/A2/A3/B1/B2/B3 & ext. 414.901 Schablone

A4/A5/A6/B4/B5/B6 & ext. 414.902 Schablone

A7/A8/A9/B7/B8/B9 & ext. 414.903 Schablone

A10/A11/A12/B10/B11/B12 & ext. 414.904 Schablone



Alle Grössen 400.108 Fixierschraube




Alle Grössen 400.106 Inbusschlüssel

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch

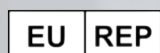

GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2025-09
Zuletzt aktualisiert: 23.09.2025